

検温アプリ 設定手順書

サーマルカメラのLEDランプについて

表示 (色)	点灯・点滅	状態の説明
● 黄	点滅	起動中 (約 10 分)
● 青	点滅	bluetooth接続中
● 青	点灯	起動完了 (bluetooth 接続済)
● 赤	点滅	bluetooth 未接続
● 赤	点灯	温度取得エラー
● 緑	点灯	温度データ取得中

サーマルカメラのランプが青色になるまでお待ちください。



Cサーマルカ...

アプリを起動します。



準備が完了しました。ボタンを押して温度補正をはじめてください。

開始

設定を押します。



設定

機器選択(Bluetooth)

Ocular-0071



検出モード設定

個別モード (顔認識有、マスク検知有)



アラートの温度設定

37.5°C



温度補正



機器選択をタップ



Bluetoothデバイスの選択



Ocular-0071

90:4E:91:66:00:D3

「Ocular-XXXX」を選択します。



設定

機器選択(Bluetooth)

Ocular-0071



機器モード設定 個別モード（顔認識有、マスク検知有）



ポートの温度設定

37.5°C



「×」で戻ります。





接續中





準備が完了しました。ボタンを押して温度補正をはじめてください。

開始

この画面が出れば準備完了です。

「e点呼セルフ」アプリで検温が実施できます。

「開始」を押すことで正しく動作するか確認できます。

次ページをご確認ください。



検温器のランプが「緑」色で点灯すれば、正常に動作しています。



顔枠に顔を写すとカウントダウンが始まりますが、この時Kebbi Airに装着した検温器のランプが「緑」色で点灯すれば、正常に動作しています。